

EUROCEPT XYTRON MEDICAL

Instructiekaart MultiTENS

AANSLUITEN

- Sluit de kabel(s) aan op de zelfklevende elektroden
- Trek voorzichtig aan de zijkant de elektroden los van het beschermde plastic folie. Bewaar het bescherm papier en het zakje, omdat de elektroden na gebruik hierop worden teruggeplakt en in het zakje moeten worden bewaard.
- Plak de elektroden op de door uw zorgverlener aanbevolen plaats op de huid
- Sluit de kabel(s) aan op de bovenkant van het Multi-TENS apparaat

INSCHAKELEN

- Zet de TENS aan door de aan/uit knop in te drukken **1**
- De Multi-TENS heeft twee onafhankelijk van elkaar in te stellen kanalen. Met PRG 1 selecteert u het gewenste programma voor de linkerkant en met PRG 2 selecteert u het gewenste programma voor de rechterkant. **3**
- Kies de gewenste intensiteit door op de + knop te drukken **2**
- Na 1 minuut schakelt de achtergrond verlichting uit en is de intensiteit automatisch vergrendeld
- Druk op de - knop om de intensiteit te ontgrendelen **4**

UITSCHAKELEN

- Schakel uw Multi-TENS altijd eerst uit voordat u de elektroden van uw huid verwijderd via de aan/uit knop **1**
- Wanneer de timer is geactiveerd schakelt de Multi-TENS aan het eind van het geprogrammeerde programma automatisch uit

ELEKTRODEN


- Plaats de elektroden na gebruik terug op de juiste kant van het bescherm plastic folie
- Bewaar de elektroden in de hersluitbare verpakking in de koelkast
- U mag geen bodylotion of andere zalf gebruiken op de plaats waar de elektroden geplakt moeten worden
- Indien u last heeft van een rode huid of bultjes, dan dient u contact op te nemen met uw pijnbehandelaar
- U mag de Multi-TENS niet gebruiken tijdens het besturen van de auto, tijdens het douchen, in bad en naar de sauna

AANPASSEN TIJDSDUUR PROGRAMMA

1. Selecteer het gewenste programma op het linker kanaal door op PRG 1 **3** te drukken
2. Indien u met twee kanalen werkt selecteert u het gewenste programma op het rechter kanaal door op PRG 2 te drukken **3**
3. Druk op de SET knop (achterkant TENS apparaat), de tijd knippert voor het linker kanaal in het scherm
4. Met de + knop aan de rechterkant **2** kunt u een tijd selecteren:
Prog. 1 t/m 5, 7 t/m 9, 11 en 12: 30 min. 1 uur, 4 uur, 9 uur of continu
Prog. 6, 10 en 13 vanaf 30 minuten instelbaar per minuut tot 60 minuten
5. Toets de linker + knop **2** in om de tijd in te stellen voor het rechter kanaal (ChB) en zie punt 4 voor de tijd
6. Met de esc. knop op de achterkant van het TENS apparaat kunt u de geselecteerde tijd bevestigen

BATTERIJ

De batterij is leeg en dient voor gebruik opgeladen te worden via bijgeleverde oplader. Deze kunt u aansluiten via de onderkant van de batterij. Het lampje brandt rood tijdens het opladen en groen als deze opgeladen is.

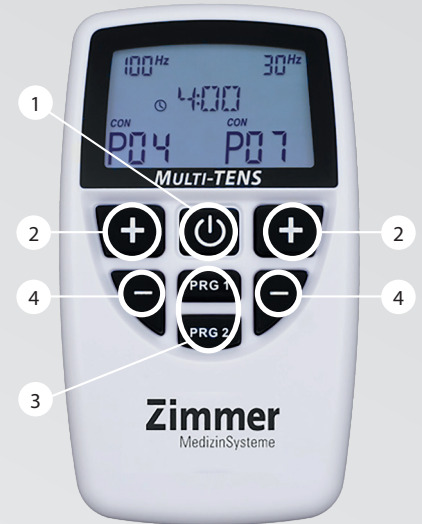

	Mode	Frequentie Hz	Pulsduur µsec	Behandeltijd
TENS Programma's				
P01	Conventioneel	80	180	4 uur
P02	Conventioneel	100	100	4 uur
P03	Conventioneel	80	200	4 uur
P04*	Conventioneel	100	100	4 uur
P05	Urge-Incontinentie	20	200	30 min
P06	AL-TENS	2	200	30 min
P07	Conventioneel	30	175	4 uur
P08	Conventioneel	1	50	4 uur
P09	Aangezichtspijn	80	60	4 uur
P10	Burst	2	180	30 min
P11*	Modulatie	80	70/180	4 uur
P12	Modulatie	80	70/180	4 uur
P13**	Han	80/2	180	30 min

* P04 en P11 altijd 2 kabels en 4 elektroden gebruiken

** P13 Han Stimulatie, In het display verschijnt rechts bovenin afwisselend: HI en LO. Dit betekent dat als HI in het display staat de intensiteit (mA) voor de 80 Hz aangepast kan worden en als LO in het display verschijnt de intensiteit (mA) voor 2 Hz aangepast kan worden met de + **2** of - **4** knop!



eurocept
xytron medical

Distributie in Nederland:

Eurocept Xytron Medical

Trappans 5
1244 RL Ankeveen

t 035 - 528 83 75

e tens@eurocept.nl

i www.tensbestellen.nl